


## Técnica quirúrgica abreviada

Consulte el manual de la técnica quirúrgica del Clavo anterógrado trocánterico TRIGEN TAN-FAN y el prospecto con información adicional sobre el producto, la salud y la seguridad.

**TRIGEN<sup>◊</sup> TAN<sup>◊</sup>**  
 Clavo adolescente

### Información acerca del implante


Dos opciones de bloqueo proximal

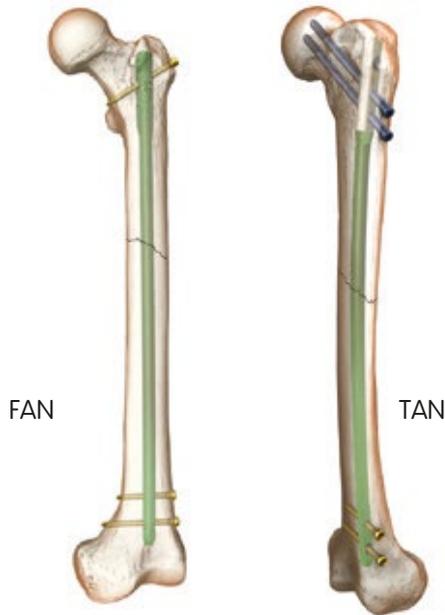

Código de colores  
 Lima = izquierda  
 Rosado = derecha




### Punto de entrada

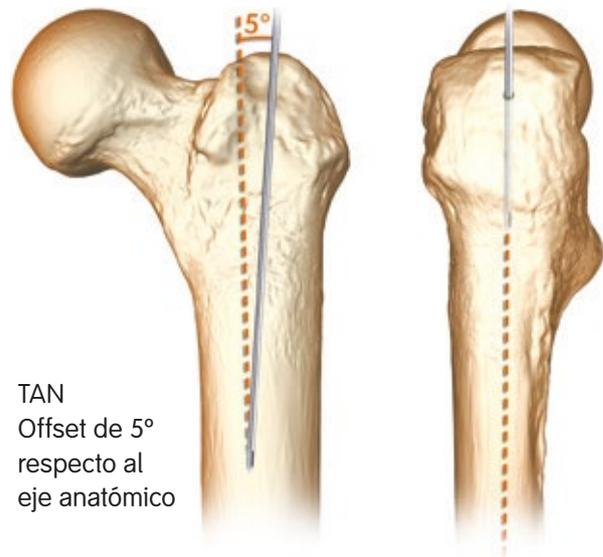


TAN  
 Offset de 5°  
 respecto al  
 eje anatómico

**Nota:** TAN adolescente con offset de 12 grados  
 respecto al eje anatómico

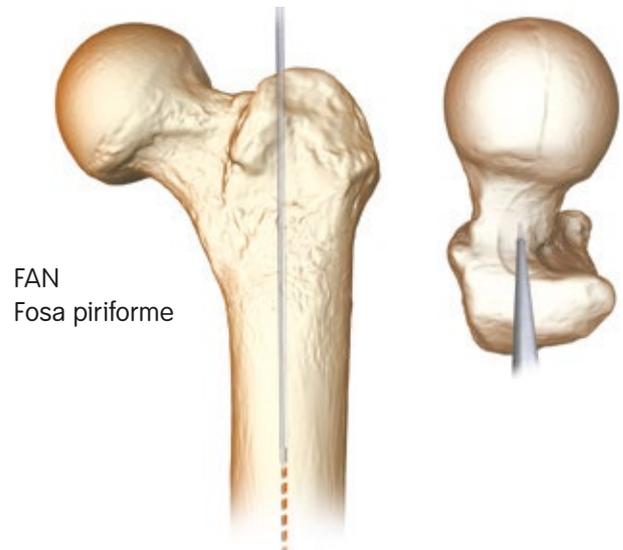

FAN  
 Fosa piriforme

**Paso 1:** Inserte una aguja guía de 3,2 mm.

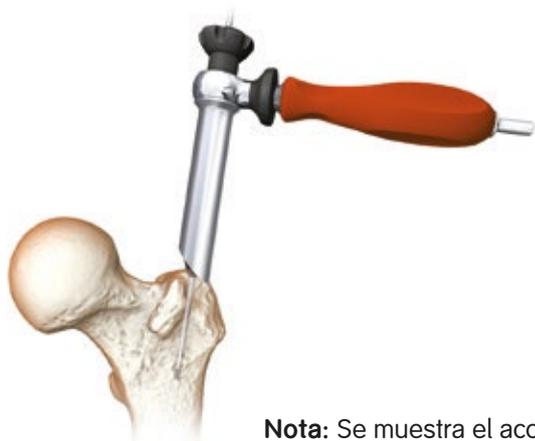


**Nota:** Se muestra el acceso para el clavo TAN

**Paso 2:** Abra el canal con la fresa de entrada de 12,5 mm insertada en la fresa de canal de 14 mm.



**Nota:** TAN adolescente: abra el canal únicamente con la fresa de entrada de 12,5 mm

**Paso 3:** Reduzca la fractura.

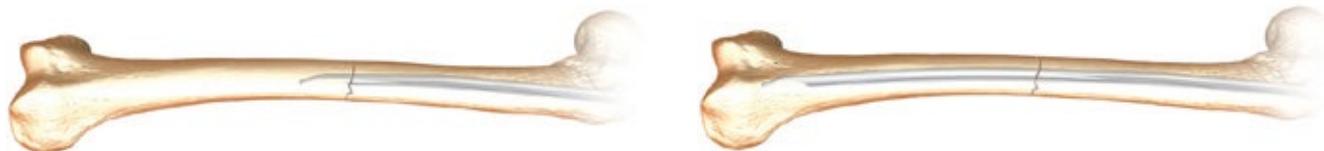

**Paso 4:** Mida la longitud del clavo y frese el canal.



Deslice la regla por la barra de guía hasta la cortical.



La parte superior de la regla se desliza hacia fuera para dar la medición de longitud del clavo (manómetro).

**Paso 5:** Monte el mango de la guía de broca en el clavo e inserte.



**Paso 6:** Verifique la profundidad y alineación del clavo (opcional).



**Paso 7:** Modalidad de bloqueo femoral (pase directamente al paso 8 en caso de bloqueo Recon).



**Paso 8:** Modalidad de bloqueo Recon.



**Paso 9:** Bloquee en sentido distal con la técnica de mano alzada.



# Clavo anterógrado trocantérico (TAN<sup>◊</sup>) adolescente

## Diferencias respecto a la técnica para el TAN adulto:

- Punto de partida más lateral a 12° del eje
- Diámetro proximal inferior a 10,5 mm
- Utilice únicamente fresa proximal de 12,5 mm (no fresa de canal)
- Debe utilizarse gota radiotransparente para el bloqueo proximal (tanto estándar como Recon)
- Orificios de bloqueo distintos en la gota radiotransparente
- Uso de tornillos grises de 4, 5 mm para el bloqueo



**Precaución:** La legislación federal de los Estados Unidos restringe la venta de estos dispositivos a médicos o por prescripción facultativa.

**Smith & Nephew, Inc.**  
7135 Goodlett Farms Parkway  
Cordova, TN 38016  
Estados Unidos

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)



**Contacto:** 099344 9211

**Dirección:** Av Amazonas N37-102 y Naciones Unidas  
Edificio Puerta Del Sol, Piso 9.

[f](#) [@](#) [in](#) @simedcorp

[www.simedcorp.com](http://www.simedcorp.com)